SSDX(-v) Parts Catalog

Realize your dreams


スリッパ殺菌ディスペンサー SSDX(-V) パーツカタログ

一般医療機器届出番号:33B2X10006000001

平素より弊社製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。 本カタログは、スリッパ殺菌ディスペンサー SSDX・SSDX-Vのパーツが消耗や破損した際、スカーブにご注文を行うことを目的としたパーツカタログです。



エンクロージャ > トップ

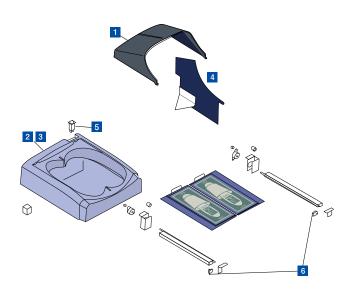



1762101250 **フードASSY** フードASSY ¥2,700



4 762103020 シキリバンASSY 仕切板ASSY

2 762102981 Iンクローシ゛ヤASSY:トツプ エンクロージャー・トップAssy ¥25,700

3762103301 IンクロージヤASSY:トツプ エンクロージャー・トップAssy

¥25,700




<u>5</u> 762330350 **デンゲンスイツチ**

電源スイッチ ¥1,200




6762330340 マイクロスイツチ

マイクロスイッチ ¥500

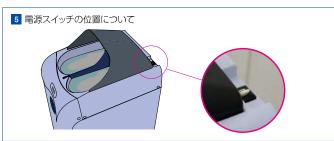

エンクロージャ > フロントアンダー

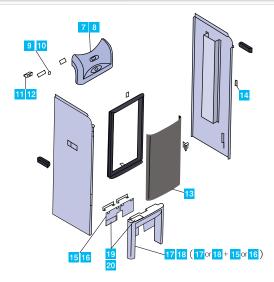



15 7621 19290 ハイシュットヒ゛ラ

排出扉 左右共通 ※銘板は別売

16 762119880 ハイシュットヒ゛ラ

排出扉 左右共通 ※銘板は別売 ¥390



17762103720 I)/10-9"1-ASSY:7)/9"-エンクロージャー・アンダー ASSY

¥7,450

18762103760 Iンクロージヤ-ASSY:アンダ-エンクロージャー・アンダー ASSY ¥7,450



7762102971 エンクローシ ヤASSY:フロント

エンクロージャー・フロントAssy ボタン白色

8762103291 Iンクローシ ヤASSY:フロント

9762871511 スイツチトツフ゜

_____ スイッチトップ(白) ¥140

スイツチトツフ゜



11762101330 トリダシスイツチASSY:ステーツキ 取り出しスイッチASSY(ステー付)

¥2,300



12762300541 **FUST STANSSY** 取り出しスイッチASSY(ステー無)

¥1,300



13762103000 ウインド**-ASSY**

フロントウインド-(フレームナシ) ¥14,500



14762871220 ハ° チンシ゛ヨウ

パチン錠 ¥1,300




19762910370 シカ゛イセントウメイハ゛ン

紫外線灯銘板 ※排出扉向かって左用 ¥140

20762911170 シカ゛イセントウメイハ゛ン


紫外線灯銘板 ※排出扉向かって左用 ¥140

エンクロージャ > L:R、バック+ベース

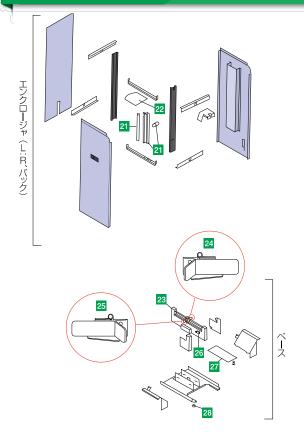



ラベル・電源コード

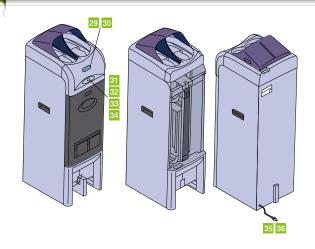



付属品

















スリッパ

スリッパの交換目安は、約1年(8時間×20日)



44 840626

¥22.000

SSDXワインレッドスリッパ

ワインレツト゛スリツハ゜







45840630 SSDXコファップ・ランスリッパ ココアフ・ラウンスリッパ ¥22.000 SSDX

名入れについて

- 1列10文字の2列で最大20文字まで 印刷が可能です。
- ※当サービスは有料サービスとなります。
- ※名入れ後の返品はお受けできませんので、ご注文時に名 入れの文字のご指示・ご確認は入念にお願いいたします。 ※納品後の名入れはお受けできません。



発注単位	10足
字体	丸ゴシック
文字色	白
印刷可能スペース	1段組:10×80mm/2段組:25×80ミリ

定期交換および製品の廃棄について

交換目安は、約1年(3,000時間)

長時間ご使用いただくと、紫外線ランプの照度が落ち、確実な殺菌効果が得られません。装置の性能を維持するために紫外線ランプ・グローランプの定期交換が必要になります。

・ 警告 保守作業は、必ず電源コードをコンセントから抜いて行ってください。

● 紫外線ランプ(15W)の交換

- ① パチン錠を解除し、フロントウインドーを開けます。
- ② 右図の位置にある紫外線ランプ(15W)を手で90°回して取り外します。
- ③ 新しい紫外線ランプ(15W)を元の位置にはめ込み、90°回します。

② グローランプ(15W)の交換

- ① パチン錠を解除し、フロントウインドーを開けます。
- ② 右図の位置にあるグローランプ(15W)を手で回して取り外します。
- ③ 新しいグローランプ(15W)を取り付けます。
- ●グローランプ(15W)は型番が「FG-1E 10~30型 |のものを使用してください。

❸ 紫外線ランプ(6W)の交換


- スリッパ排出扉を開いておきます。
- ② 右図の位置にある紫外線ランブ(6W)を手で90°回して取り外します。 (左右に各1本あります)
- ③ 新しい紫外線ランプ(6W)を元の位置にはめ込み、90°回します。
- ●ソケット部(樹脂製)は割れやすいので注意してください。

4 グローランプ(6W)の交換

- ① パチン錠を解除し、フロントウインドーを開けます。
- ② 右図の位置にあるグローランプ(6W)を手で回して取り外します。 (左右に各 1 個あります)
- ③ 新しいグローランプ(6W)を取り付けます。
- ●グローランプ(6W)は型番が「FG-7E 4~10型」のものを使用してください。

❺ 製品の廃棄について

- ●事業所でのご使用の場合は、産業廃棄物処理業者に依頼してください。
- ●ご家庭でのご使用の場合は、自治体の処理方法にしたがってください。

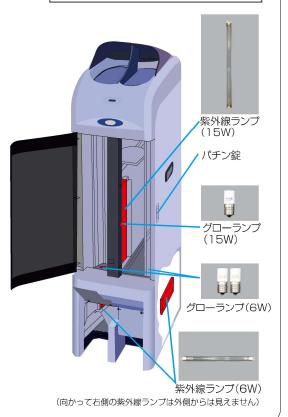

ご購入は、本装置をお買い求めいただきました販売店へご用命ください。

問い合わせ先 株式会社IHI物流産業システム

環境ソリューションBU 営業・サービスグループ 〒135-0061

東京都江東区豊洲三丁目1番1号 豊洲IHIビル TEL.03-5859-5012 FAX.03-5859-5149 https://iat.i9.bcart.jp/page/top (QRコードよりアクセスしてください)



取り扱い・お問い合わせ